



ArgoCap®

Erleichtert die einfache und präzise APC-Behandlung

- Abwinklung der Sonde für besseres Handling und Gewebeerreichbarkeit
- Konstanter Sondenabstand durch sichere Fixierung
- Ermöglicht APC mit Injektion ohne Instrumentenwechsel



ArgoCap®

Details und Lieferbestandteile



Die ArgoCap® ist eine endoskopische Aufsatzkappe, welche die präzise Ablation bei der APC-Behandlung oberflächlicher Läsionen im Gastrointestinaltrakt erleichtert.

Die feste Positionierung der APC-Sonde im Inneren der Kappe ermöglicht eine sichere Führung der Sonde. Der konstante Abstand der Sondenspitze erlaubt die fokussierte Anwendung¹ unter Sichtkontrolle.

Das spezielle Kappendesign erzeugt eine Abwinklung der Sonde, welche das Handling während der Anwendung und die Erreichbarkeit der zu behandelnden Stelle erleichtert, wodurch eine Über- oder Unterbehandlung vermieden wird. Da die Sonde außerhalb des Endoskopschafts entlanggeführt wird, bleibt der Arbeitskanal frei für ein zusätzliches Instrument.

Die ArgoCap® ist mit APC-Sonden mit axialem Auslass und einem Außendurchmesser von 2,3 mm kompatibel.

Technische Spezifikationen

 ARGO CAP®	Gesamtlänge [mm]	Kappentiefe [mm]	Kompatible Sondendurchmesser Ø [mm]	Kompatible Endoskopdurchmesser Ø [mm]	Max. Aussendurchmesser Ø [mm]	Art.Nr.
ArgoCap®	28	16	2,3	9,2–10,5	15,5	200.52

¹ Mueller J, Kayser G, Kuellmer A, Schiemer M, Bettinger D, Offensperger F, Thimme R, Schmidt A. **ArgoCap – feasibility and safety of a novel over-the-scope device to facilitate endoscopic APC treatment.** Minim Invasive Ther Allied Technol. 2023 Jun;32(3):103-111.

Anwendungsbeispiel



Barrett-Ösophagus

Einführen des Endoskops mit der montierten ArgoCap®

Lokalisation der zu behandelnden Stelle und Beginn der APC-Behandlung

Weitere APC-Behandlung der verbleibenden Gewebestellen

Erfolgreiche APC-Behandlung, Entfernung des Endoskops

Quelle: Prof. Dr. med. Benjamin Walter, Universitätsklinikum Ulm, Deutschland

ArgoCap®_Fl_deu_Rev3_2025-05-26_800145
Weitere Informationen und Produktdetails finden Sie in der Gebrauchsanweisung.



Ovesco Endoscopy AG
Friedrich-Miescher-Str. 9 | D-72076 Tübingen
+49 (0) 7071 96528-160 | service@ovesco.com
www.ovesco.com