


# BougieCap.

Pour la dilatation des sténoses du tractus digestif supérieur

- Contrôle visuel immédiat pour une dilatation précise
- Moins de changement d'instruments, pour une dilatation simple et efficace
- Jusqu'à 99 % de déchets en moins en comparaison avec des procédures de dilatation conventionnelles<sup>1</sup>

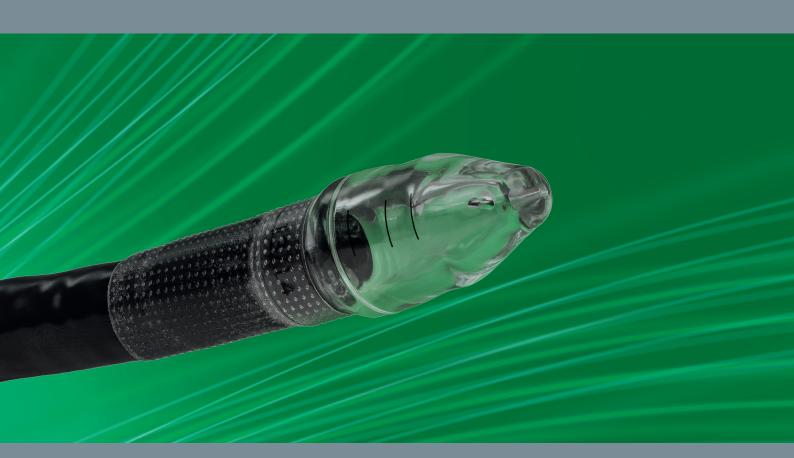





## BougieCap

Pour la dilatation contrôlée et effective de sténoses et de strictures dans le tractus gastro-intestinal inférieur.

Le BougieCap permet un contrôle visuel immédiat pendant la dilatation. Grâce à sa conception en deux niveaux, la dilatation est réalisée de manière extrêmement douce et précise, par millimètres et permet ainsi d'éviter une surdilatation.

L'évaluation de la dilatation effectuée peut se faire directement avec le capuchon transparent en place. L'absence de changement d'instruments fait gagner beaucoup de temps lors de la procédure.


Les deux ouvertures latérales distales permettent l'insufflation d'air, l'aspiration et le rinçage. L'ouverture centrale de la pointe permet d'utiliser le BougieCap avec un fil de guidage (max. 1 mm/0,038 in).

#### Versions disponibles

BougieCap	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
Réf.	400.31.02	400.31.03	400.32.01	400.32.02	400.32.03	400.32.04
Diamètre d'endoscope [mm]	5,4–5,9		9,4–9,9			


### Utilisation

#### Sténose œsophagienne

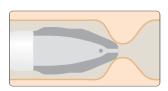


Guidage de l'endoscope avec le BougieCap en place en s'arrêtant juste devant la sténose.



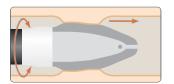

Avance prudente jusqu'au premier plateau de dilatation à l'aide de petits mouvements rotatifs. Si besoin, continuer à avancer jusqu'au deuxième plateau.



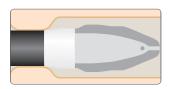

Passage réussi de la sténose.



 Yzet C, Figueiredo M, Michoud C, Lafeuille P, Rivory J, Pioche M. Ecological impact of endoscopic dilatation using the bougie cap device: a low-tech innovation to reduce waste by 99 %. Endoscopy. 2022; 10.1055/a-1838-3860.
Prof. Meining, Hôpital universitaire Würzburg, Allemagne.

#### ovesco

Organisme : CE0297 Fabricant :

Ovesco Endoscopy AG

Les indications, contre-indications, mises en garde et mode d'emploi figurent sur la notice d'utilisation livree avec chaque dispositif; veuillez les lire attentivement avant toute utilisation du dispositif.

#### **Ovesco Endoscopy France SAS**

99 avenue du 12 Février 1934 92240 MALAKOFF / Paris France

Téléphone +33 (0)1 46 12 90 58 Fax +33 (0)1 41 48 52 24 E-Mail order@ovesco.fr

#### **Ovesco Endoscopy AG**

Friedrich-Miescher-Strasse 9 72076 Tuebingen Allemagne

Téléphone +49 7071 96528-160 Fax +49 7071 96528-260 E-Mail service@ovesco.com

Scannez ce code QR pour plus d'informations sur le dispositif



www.ovesco.com



produit et commercialise des produits innovants pour la détection et le traitement des maladies du système digestif. Les produits Ovesco sont réputés pour leur efficacité et leur utilisation pratique

La société Ovesco Endoscopy AG est spécialisée dans la fabrication de produits médicaux destinés

French version 4 | 2024-12-04