


BougieCap.....

Para a dilatação de estenoses no trato gastrointestinal superior

- Controle visual direto para uma dilatação precisa
- Dilatação simples e eficaz com menos trocas de instrumentos
- Até 99% menos desperdício em comparação com os métodos de dilatação convencionais¹

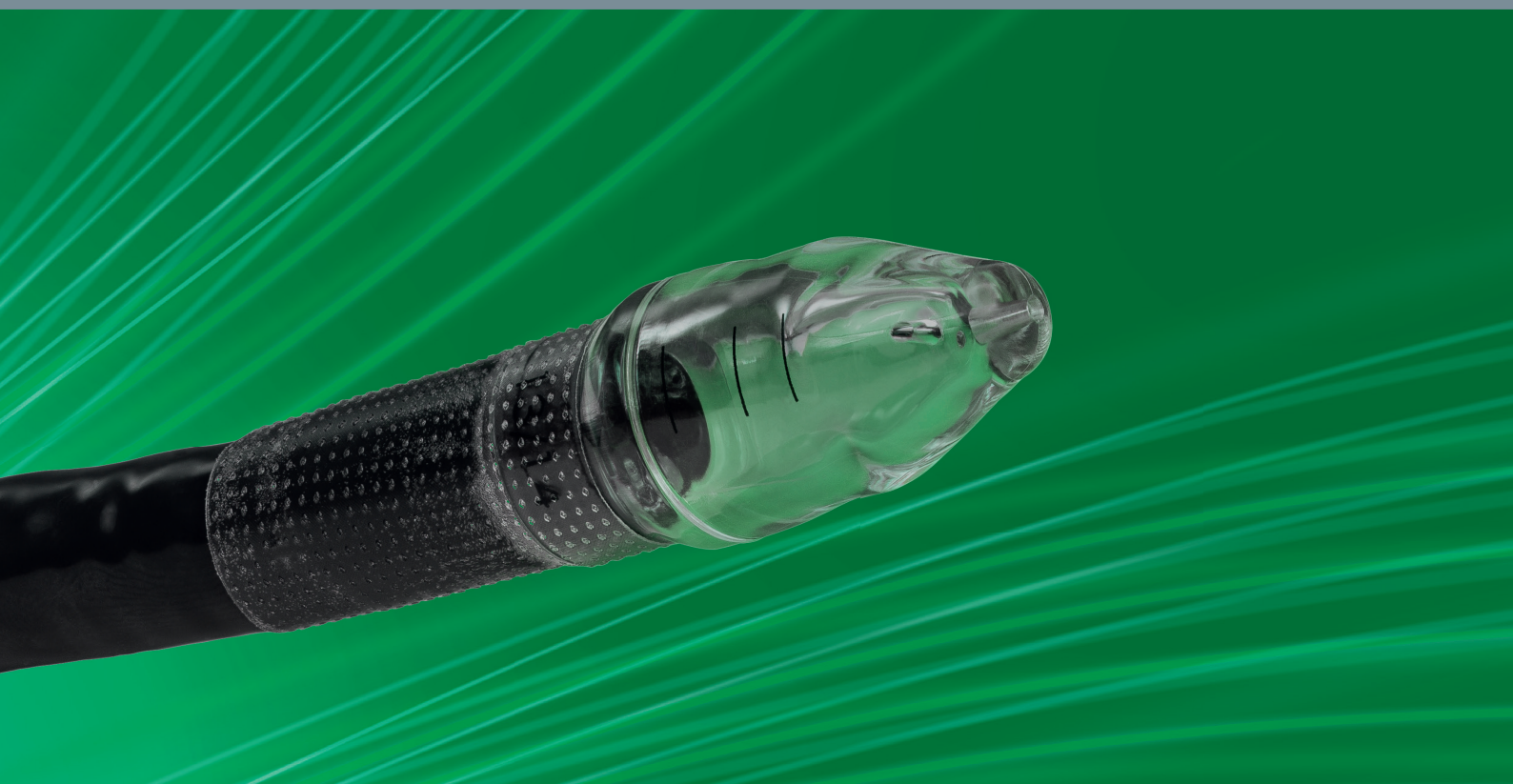



BOUGIE
CAP



O V E S C O



BougieCap

Para uma dilatação controlada e eficaz de estenoses e restrições no trato gastrointestinal superior.

O BougieCap permite o controle visual direto durante o procedimento de dilatação. Graças ao seu design cônico, as estenoses e restrições podem ser dilatadas com muito cuidado e precisão em aumentos milimétricos, evitando assim o alongamento excessivo.

A tampa transparente acoplada permite a avaliação direta da dilatação. Além disso, o tempo do procedimento é reduzido devido ao menor número de trocas de instrumentos.


Os dois orifícios na extremidade distal da tampa permitem a insuflação, a sucção e a lavagem. Um orifício central na ponta permite que o BougieCap seja usado com um fio-guia (máx. 1mm/0,038 pol.).

Versões Disponíveis


BougieCap	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
Nº de referência	400.31.02	400.31.03	400.32.01	400.32.02	400.32.03	400.32.04
Diâmetro do endoscópio [mm]	5,4–5,9		9,4–9,9			

Aplicação


Estenose esofágica

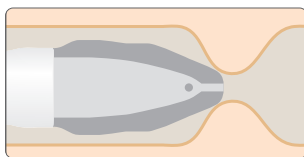




Guie o endoscópio com o BougieCap acoplado até um pouco antes da estenose.

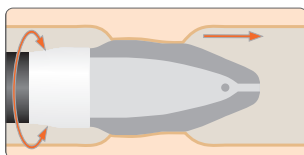

Empurre cuidadosamente o BougieCap até o primeiro platô de dilatação usando rotações suaves. Em seguida, se necessário, continue empurrando até atingir o segundo platô.

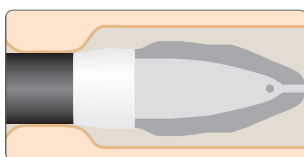

Passagem bem-sucedida.

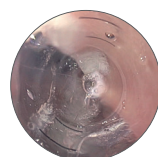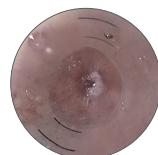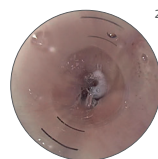

1 Yzet C, Figueiredo M, Michoud C, Lafeuille P, Rivory J, Pioche M. **Ecological impact of endoscopic dilatation using the bougie cap device: a low-tech innovation to reduce waste by 99 %.** Endoscopy. 2022; 10.1055/a-1838-3860.

2 Prof. Meining, Hospital universitario de Würzburg, Alemanha.

Distribuidor Autorizado



Lynx Medical

Narciso Sturlini, 302 – Cidade:
Osasco, São Paulo – Brazil
Phone: +55 (11) 3682-4618 or
3683-8851
E-Mail: vendas@lynxmedical.com.br

Ovesco Endoscopy USA Inc.

15300 Weston Parkway
Suite 101
Cary, NC 27513,
USA

Phone +1 919 651 9449
Fax +1 408 608 2077
customerservice@ovesco-usa.com

Escaneie aqui
para obter mais
informações
sobre o produto



A **Ovesco Endoscopy AG** é uma empresa de dispositivos médicos especializada nas áreas de endoscopia flexível, cirurgia endoluminal e diagnóstico telemétrico. A empresa desenvolve, fabrica e comercializa produtos inovadores para a detecção e o tratamento de doenças gastrointestinais. Os produtos da Ovesco são sinônimos de eficácia e aplicação eficiente.

www.ovesco.com



Portuguese version 2 | 2025-03-17