

Handhabung des OTSC Proctology Applikators während der Prozedur

1. Beim Einführen des Applikators:
Korrektes Halten der Fäden (1a), Fäden nicht mit dem Fadenholer halten (1b).
2. Vor der Clipapplikation:
Den OTSC Proctology Applikator parallel zur Achse des Analkanals ausrichten (2a). Eine falsche Ausrichtung des Applikators kann zu einer fehlerhaften Clippausrichtung führen (2b).
3. Nach der Clipapplikation:
Den Abzug während der Entfernung des OTSC Proctology Applikators von der Applikationsstelle gedrückt halten (3a). Die Clipplatzierung kann nicht garantiert werden, wenn der Abzug in seine Ausgangsposition zurückgeschoben wird (3b).

