

BARS® – Montageanleitung







BARS®
SET

ovesco
innovation in scope

Prüfen: Endoskopdurchmesser (10,0 – 12,0 mm)/Arbeitskanaldurchmesser ($\geq 3,7$ mm)/Einföhrlänge (≤ 110 cm)

1. Komponenten aus dem Blister entnehmen.
2. Befestigungsspanne am Endoskophandgriff anbringen.
3. Handrad auf dem Endoskop-Arbeitskanal montieren und mit dem Klettband fixieren.
4. Fadenholer einföhren und Fadenende greifen. Faden durch den Arbeitskanal ziehen.
5. Faden am Handrad fixieren (wie bei OTSC® System) und aufwickeln.
6. Applikationskappe auf das Endoskop bis zum Anschlag montieren. Wichtig: der innere BARS® Arbeitskanal und der Endoskop-Arbeitskanal liegen direkt gegenüber und keine Funktion des Endoskops ist verdeckt.
7. Das kurze Föhrungelement mit einem und das lange Föhrungelement mit drei der beiliegenden Klebestreifen am Endoskop fixieren.
8. BARS® Arbeitskanäle mit weiteren Klebestreifen im Abstand von ca. 20 cm am Endoskop fixieren.
9. An der Befestigungsspanne geeignete Positionen zum Anbringen der Konnektoren wöhlen. Die Arbeitskanäle sollten weder zu locker sitzen, noch zu stark gespannt sein.
10. Die Konnektoren zuerst seitlich an einem Schlitz ansetzen, dann durch Kippen auf der gegenüberliegenden Seite einrasten. Wichtig: Schäfte verlaufen gerade am Endoskopenschaft und überschneiden sich nicht.

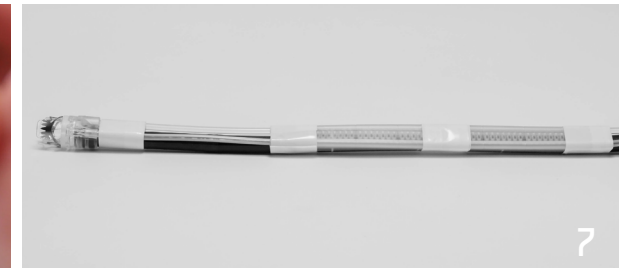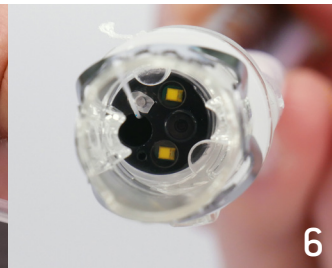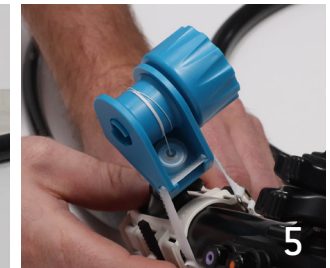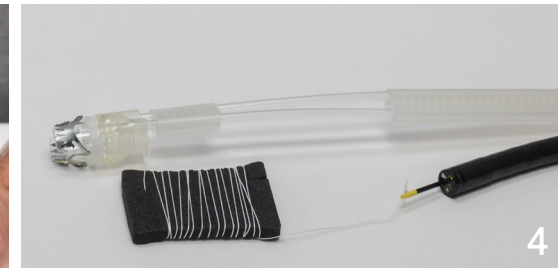

Aufbauvideo



OVE BARS_Assembly sheet_deu_Rev01_2023-05-16