


Kurzanleitung zur Anwendung

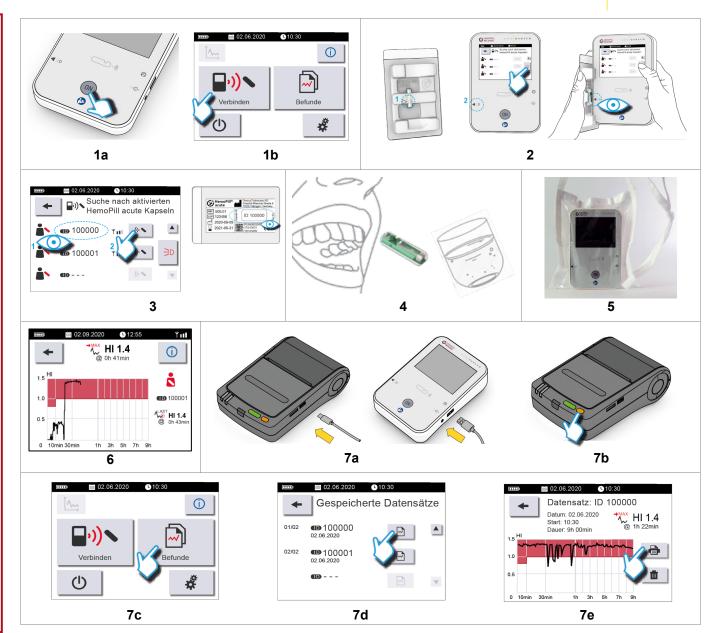

- 1. HemoPill Receiver einschalten (1a) und im Hauptmenü "Verbinden" auswählen. (1b)
- 2. HemoPill acute über eingebaute LED-Lichtquelle aktivieren (Pfeile auf Gerät und Blister zueinander führen). (2)
 - Blinksignal der Kapsel beachten:
 - Blaues Blinken: HemoPill acute ist einsatzbereit.
 - Rotes Blinken: HemoPill acute ist fehlerhaft und darf nicht eingesetzt werden.
- Verbindung zwischen HemoPill acute und Receiver herstellen.
 (Angezeigte Kapsel-ID mit Angabe auf der Verpackung abgleichen). (3)
- HemoPill acute dem Patienten übergeben und mit einem Glas Wasser (mind. 100 ml) schlucken lassen. (4)
- 5. HemoPill Receiver in Einweg-Gerätetasche am Patienten (Brust-/Bauchhöhe) positionieren. (5)
- 6. Messung auf dem Display des HemoPill Receiver verfolgen (6):
 - MAXHI: maximaler HI-Wert
 - LASTHI: zuletzt gemessener HI-Wert
 - − ①: Infos zur Interpretation der HI-Werte
- 7. Befunde ansehen und/oder ausdrucken:
 - HemoPill Printer über Netzkabel an Stromnetz anschließen.
 - Drucker und Receiver über USB-Kabel verbinden. (7a)
 - Drucker über orangenen Knopf einschalten. (7b)
 - Receiver eischalten und im Hauptmenü "Befunde" auswählen. (7c)
 - Befund der zugehörigen Kapsel-ID auswählen. (7d)
 - Drucker-Symbol auswählen, um Druckvorgang zu starten. (7e)





Hinweise –



Patient / HemoPill acute:

- Der Patient benötigt keine Vorbereitung bei der Einnahme der HemoPill acute.
- Eine bereits aktivierte Kapsel lässt sich nicht mehr deaktivieren.
- Der Patient entnimmt selbständig die Kapsel aus dem Blister (1a). Die Kapsel muss mittig gegriffen werden, ohne den Bereich des blinkenden Messspalts abzudunkeln. (1b)
- Die Einnahme sollte in sitzender Position und muss mit mindestens
 100 ml Wasser erfolgen.
- Nach 9 h Messzeit schaltet die Kapsel in den Präsenzmodus für weitere 21 Tage. Die Ausscheidung der Kapsel kann hierüber überprüft werden. (2a–2c)

HemoPill Printer:

- Der HemoPill Printer ist kein medizinisches elektrisches Gerät. Er darf nicht in der Patientenumgebung verwendet werden.
- Der HemoPill Printer ist ein Thermodrucker. Das temperatursensitive Papier ist auf einer Seite speziell beschichtet und muss richtig herum eingelegt werden. (3)
- Beim Einkleben des Ausdrucks in die Patientenakte dürfen keine Flüssigkleber oder Klebestifte verwendet werden. Dies kann die Haltbarkeit des Drucks beeinflussen.

HemoPill Receiver

- Der HemoPill Receiver sollte vor erstmaliger Anwendung mit dem mitgelieferten Netzteil vollständig aufgeladen werden. (4)
- Laden Sie den Receiver in regelmäßigen Abständen (ca. alle 6 Monate) auf.
- Zur Reinigung des Receivers können Reinigungs- und
 Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis verwendet werden. Mittel auf Basis von Aminen dürfen nicht verwendet werden.



1a




2a



3




,

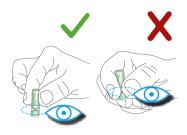

h



2b

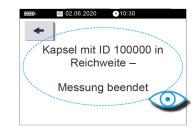

2c



QR-Code zum Anwendungsvideo